

SÉQUENCES

SÉQ. N°	PROGRAMMES (PAS N°)				TEMPS (min)	MODE	COMMENTAIRE / PATHOLOGIE
	1	2	3	4			
S 01	P01	P05	-	-	25	MAS/MAGNÉ	Pré-échauffement rapide avant l'entraînement : Cheval normal
S 02	P02	P06	-	-	25	MAS/MAGNÉ	Régénération post-entraînement RAPIDE
S 03	P03	P04	P03	-	50	MAGNÉTISME	Régénération / Récupération après l'entraînement : séquence de soin Avant l'entraînement pour cheval très chaud ou stressé
S 04	P04	P16	P03	-	50	MAS/MAGNÉ	Avant l'entraînement pour cheval chaud - Décontraction/Relaxation
S 05	P01	P17	P07	-	40	MAS/MAGNÉ	Pré-échauffement avant l'entraînement cheval raide
S 06	P08	P07	P08	P07	25	MAS/MAGNÉ	Guêtres combi II : Régénération
S 07	P08	P08	P08	P08	25	MAGNÉTISME	Guêtres : Membre Fréquence faible (pathologie récente)
S 08	P08	P09	P08	P09	25	MAGNÉTISME	Guêtres : Membre Fréquence élevé (pathologie ancienne : molette)

PROGRAMMES

PROG. N°	MODE	TEMPS (min)	FRÉQUENCE (Hz)	INTENSITÉ (0-10)	LASER	DURÉE MAS (s)	VIBRATION (0-10)	COMMENTAIRE
P01	Magnétisme	15	12 Hz	10	OFF	OFF	0	Pré-échauffement avant l'entraînement cheval normal
P02	Magnétisme	15	8 Hz	10	OFF	OFF	0	Régénération post-entraînement
P03	Magnétisme	20	6 Hz	10	OFF	OFF	0	Régénération / Récupération après l'entraînement Pré-échauffement avant l'entraînement cheval très chaud/stressé
P04	Magnétisme	10	8 Hz	10	OFF	OFF	0	Programme de Relaxation général
P05	MAS	10	OFF	0	OFF	6 sec	6	Pré-échauffement avant l'entraînement
P06	MAS	10	OFF	0	OFF	5 sec	5	Régénération post-entraînement
P07	MAS	5	OFF	0	OFF	6 sec	4	Massage 5 min
P08	Magnétisme	5	4 Hz	8	OFF	OFF	0	Guêtres : Membre Fréquence faible (pathologie récente)
P09	Magnétisme	5	6 Hz	10	OFF	OFF	0	Guêtres : Membre Fréquence élevé (pathologie ancienne : molette)
P10	Magnétisme	15	8 Hz	10	OFF	OFF	0	WLP rapide (faible)
P11	Magnétisme	15	10 Hz	10	10	ON	5	WLP rapide (moyen)
P12	Magnétisme	15	14 Hz	10	14	OFF	0	WLP rapide (élevé)
P13	Magnétisme	20	18 Hz	10	14	ON	0	WLP intensif
P14	Magnétisme	30	10 Hz	10	OFF	OFF	0	Programme de relaxation que Magnétisme
P15	MAS	20	OFF	3	OFF	3 sec	4	Programme de relaxation que Massage
P16	MAGNÉ / MAS	20	8 Hz	10	OFF	6 sec	5	Pré-échauffement avant l'entraînement cheval chaud / calmer - relaxer
P17	MAGNÉ / MAS	20	12 Hz	10	OFF	8 sec	5	Pré-échauffement avant l'entraînement cheval raide ou normal / assouplir
P18	MAGNÉ / MAS	20	12 Hz	10	14	ON	5	Triple Powerpad

OFF : désactivé | LASER : intensité (0-14) | DURÉE MAS : durée de massage (secondes)

CONSEILS D'UTILISATION / PATHOLOGIES

INDICATION	SÉQUENCE(S)	PROGRAMME(S)	TEMPS TOTAL
Problèmes musculaires suraigus du dos, courbatures	S 03* en alternance avec P 01	P03, P04, P03, P01, P05	40 min, en alternance 3 heures pause - Recommencer
Problèmes musculaires chroniques du dos	S 03	P03, P04, P03	2 x 40 min
Traitement pendant la convalescence pour soutenir le métabolisme	S 02	P02, P06	2 x 25 min
Maladies pulmonaires chroniques	S 03	P03, P04, P03	40 min
Colique spasmodique	S 03* en alternance avec P 01	P03, P04, P03, P01, P05	40 min alternatif 3 heures pause entre deux
Maladies du rein / foie	S 04	P04, P16, P03, P01, P05	45 min
Foie douloureux / maladie rénale	S 03	P03, P04, P03	45 min
Trouble minéral	S 02	P02, P06	25 min
Application Avant entraînement	S 01	P01, P05	25 min
Application après entraînement	S 02	P02, P06	25 min

* S 03 : séquence de soin